



微信官网



**Suzhou Letai Medical  
Technology Co., Ltd**





# 公司简介 COMPLETE PROFILE

苏州乐泰医疗科技有限公司于2015年创立，坐落于苏州高新区医疗器械产业聚集区；公司主要业务聚焦于医用耗材、医用材料的研发、生产、销售。目前已上市和在研的产品包括医用传导类耗材、防护类耗材、治疗类耗材（见一览表）。公司拥有经验丰富的研发人员，并且积极与国际一流医疗耗材企业学习交流，用以保证公司技术创新产品在行业内的领先。

公司成立以来，发展迅速，产品主要出口于欧洲、美洲等发达国家，同时被国内各地医院以及医疗器械企业OEM配套等广泛使用。公司坚持以“**创新、专注、专业**”为经营理念，以精湛的工艺、卓越的生产技术、高效的服务，赢得国内外客户的信任与支持。

公司产品已通过 ISO13485 和欧盟CE认证。

Established in 2015, Letai Medical Technology Co., Ltd. is located in the gathering area of Medical Devices Industrial Park in Suzhou High-tech Zone. Its main business focuses on the research, development, production and sales of medical consumables and medical materials. At present, the products listed and under research include medical conductive consumables, protective consumables and therapeutic consumables (see table). The company has experienced R&D personnel, and actively learn and communicate with international first-class medical consumables enterprises to ensure that the company's technological innovation products in the industry leader.

Since its establishment, the company has developed rapidly. Its products are mainly exported to developed countries such as Europe and America. At the same time, they are widely used in hospitals and OEM matching of medical equipment enterprises in China. The company adheres to the business philosophy of "innovation, focus and specialty", and wins the trust and support of customers at home and abroad with exquisite craftsmanship, excellent production technology and efficient service.



www.letaimedical.com.cn

## 公司产品一览表 PRODUCTION

### 治疗类耗材

- 01 硅酮疤痕凝胶
- 02 远红外暖宫贴
- 03 生理性海水鼻腔喷雾器
- 04 灸热贴
- 05 穴位磁疗敷贴
- 06 抗过敏凝胶
- 07 医用退热贴
- 08 医用冷敷贴
- 09 肌内效贴

### 传导类耗材

- 01 一次性使用心电电极
- 02 医用超声耦合剂
- 03 理疗电极片
- 04 超声贴片
- 05 医用导电膏
- 06 一次性使用中性电极
- 07 中医定向透药治疗仪电极片

### 防护类耗材

- 01 自粘弹性绷带
- 02 医用记号笔
- 03 光子冷凝胶
- 04 医用冷敷眼罩
- 05 高分子固定绷带
- 06 医用高分子夹板





医疗器械生产许可证编号：苏食药监械生产许20170054号  
医疗器械产品注册证编号：苏械注准20192090055  
医疗器械产品技术要求编号：苏械注准20192090055

圣惠®



治疗类耗材  
灸热贴

四种治疗方式 灸疗、热疗、磁疗、远红外疗

三大功效 祛风散寒、舒筋活血、消肿止痛



苏州乐泰医疗科技有限公司  
Suzhou Letai Medical Technology Co., Ltd

创新 专注 专业  
INNOVATION / ABSORBED / PROFESSIONAL

# 灸热贴

## 产品综述

灸热贴是以静电磁场疗法原理为依据,开发的灸热贴作用于人体穴位、局部或者全身,以达到治疗疾病目的的方法。磁场影响人体电流分布、荷电微粒的运动、膜系统的通透性和生物高分子的磁矩取向等,使组织细胞的生理、生化过程改变,产生消肿、镇痛、促进血液及淋巴循环、提高骨密度等作用。

## 处方资料

【产品名称】 灸热贴

【型号/规格】 分为JR-A型、JR-B型、JR-C型、JR-D型、JR-E型、JR-F型、JR-G型七种规格。

【主要结构】 灸热贴由远红外布、磁片、发热袋、底布、防粘离纸组成,发热袋由铁粉、活性炭组成。

【使用方法】 1、使用前请清洁皮肤,揭去粘胶离型纸,将磁体部位对准患处,将粘胶护翼巾于皮肤固定即可;  
2、每贴使用24小时,每贴间隔2~3小时使用,治疗周期遵医嘱。

【禁忌症】 1、孕妇下腹部、皮肤溃烂、伤口处、安装心脏起搏器患者的心区,体内植入芯片者植入部位禁用;  
2、过敏者禁止使用。

【注意事项】 1、使用前请仔细阅读使用说明书;  
2、本品揭开即热,不使用切勿开袋;  
3、注意防烫伤,感觉到皮肤无法承受温度即取下或隔层使用;  
4、本品勿靠近手表、磁卡、磁盘等物品。

【适用人群】 关节炎病人、老人。

【针对疾病】 用于风湿类、类风湿性关节炎、颈椎病、肩周炎、腰腿痛、关节痛、坐骨神经痛等疼痛的辅助治疗。

其他内容详见使用说明书。

医疗器械生产许可证编号:苏食药监械生产许20170054号

医疗器械产品注册证编号:苏械注准20192090055


医疗器械产品技术要求编号:苏械注准20192090055

注册人/生产企业/售后服务单位:苏州乐泰医疗科技有限公司

住所/生产地址:苏州高新区五台山路116号7幢

电话/传真:0512-68784262

邮编:215163

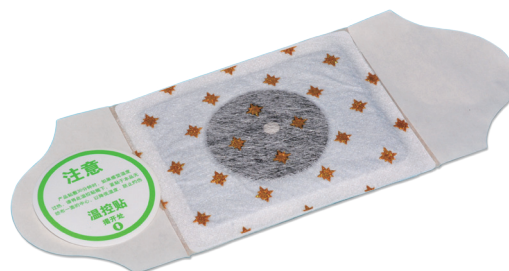



医疗器械生产许可证编号：苏食药监械生产许20170054号

医疗器械产品注册证编号：苏械注准20192090054

医疗器械产品技术要求编号：苏械注准20192090054

圣惠®



治疗类耗材

远红外暖宫贴

二类医疗器械

热疗、艾疗、远红外疗3重功效，多重呵护

艾草-益母草本包，养护卵巢，增益暖宫功效



苏州乐泰医疗科技有限公司  
Suzhou Letai Medical Technology Co., Ltd

创新 专注 专业  
INNOVATION / ABSORBED / PROFESSIONAL

# 远红外暖宫贴



## 产品综述

远红外暖宫贴是专为女性研制的产后护理产品，利用热敷理疗以达到为女性暖宫的效用。促进局部血液循环、辅助消炎、消肿和止痛。

## 处方资料

【产品名称】 远红外暖宫贴

【型号/规格】 分为NG- I 型、NG- II 型、NG-III型、NG-IV型四种规格

【产品性能】 1、本品能自行发热，升温时间 $\leq 10\text{min}$ 、最高温度 $\leq 70^{\circ}\text{C}$ 、持续时间 $\geq 5\text{h}$ 、温度保证时间 $\geq 5\text{h}$ 。  
2、持粘性不大于2.5mm。  
3、剥离强度每1cm宽度所需的平均力应不低于1.0N。

【适用范围】 远红外暖宫贴适用于促进局部血液循环、辅助消炎、消肿和止痛。

【主要结构】 远红外暖宫贴由远红外布、发热袋、底布、防粘离纸组成，发热袋主要由铁粉、活性炭、盐、蛭石，树脂，水组成。

【使用方法】 外用，沿着包装袋打开，取出贴片，揭下防粘离纸，贴于正对“气海穴”（体前正中线上，脐下一寸半）的内裤外侧即可。

【禁忌症】 1、孕妇、糖尿病和有血液循环障碍者禁用；  
2、皮肤热敏感度低者禁止使用；  
3、严重急性期炎症患者禁用。

【注意事项】 1、外用，一次性使用，不要直接粘贴在皮肤上；  
2、打开内袋后应立即使用，使用中若感觉过热，可适当加以隔垫，谨防烫伤；  
3、睡时慎用，谨防无痛感的低温灼伤；  
4、生活不能自理者须在监护人监护下使用；  
5、置于儿童接触不到的地方。

其他内容详见使用说明书。

医疗器械生产许可证编号：苏食药监械生产许20170054号

医疗器械产品注册证编号：苏械注准20192090054


医疗器械产品技术要求编号：苏械注准20192090054

注册人/生产企业/售后服务单位：苏州乐泰医疗科技有限公司

住所/生产地址：苏州高新区五台山路116号7幢

电话/传真：0512-68784262

邮编：215163

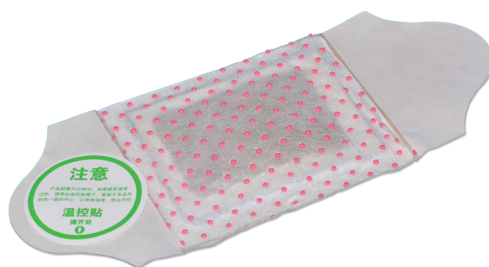



医疗器械生产许可证编号：苏食药监械生产许20170054号  
医疗器械产品注册证编号：苏械注准20192200028  
医疗器械产品技术要求编号：苏械注准20192200028



治疗类耗材  
穴位磁疗敷贴

医用永磁钕铁硼

独有的强效透皮吸收物质

国家二类医疗器械准字号

医保收费项目：贴敷疗法、穴位贴敷、灸法



# 穴位磁疗敷贴



## 产品综述


穴位磁疗敷贴为永磁材料、透气胶布、基质防护层和防粘纸等四部分组成.采用磁热疗法和贴敷疗法相结合具有促进血液循环、消炎、消肿、止痛等辅助治疗作用

## 处方资料

- 【产品名称】 穴位磁疗敷贴
- 【型号/规格】 分为XW-A、XW-B、XW-C、XW-D、XW-E、XW-F、XW-G七种规格。
- 【主要结构】 穴位磁疗敷贴由压敏胶布、磁片、胶树脂、防粘离纸组成。
- 【使用方法】 1、清洁穴位体表皮肤,揭掉穴位敷贴防粘离纸,将功效面外敷于穴位;  
2、每贴贴敷时间以24~48小时为宜;  
3、请在医生指导下正确使用。
- 【禁忌症】 1、对医用胶布过敏者、孕妇及佩戴心脏起搏器的患者禁用;  
2、严重的心、肝、肺、肾衰竭的患者;  
3、白细胞总数低于 $4.0 \times 10^9/L$ 的患者、有出血倾向或者出血者慎用;  
4、对磁疗有明显不良反应者;  
5、体质极度虚弱者。
- 【注意事项】 1、使用中若有不适或偶有皮肤表面发红,请立即停止使用。  
2、本品为外用贴剂,请勿误食。儿童须在成人监督下使用。  
3、穴位磁疗敷贴为一次性使用,不得二次使用。  
4、请将本品放在儿童不能接触的地方。  
5、阴凉处存放。  
6、产品过期禁止使用。
- 【贮存、运输条件】 本品应避日光直射,置阴凉处,密封保存。

其他内容详见使用说明书。

医疗器械生产许可证编号:苏食药监械生产许20170054号  
医疗器械产品注册证编号:苏械注准20192200028  
医疗器械产品技术要求编号:苏械注准20192200028  
注册人/生产企业/售后服务单位:苏州乐泰医疗科技有限公司  
住所/生产地址:苏州高新区五台山路116号7幢  
电话/传真:0512-68784262  
邮编:215163

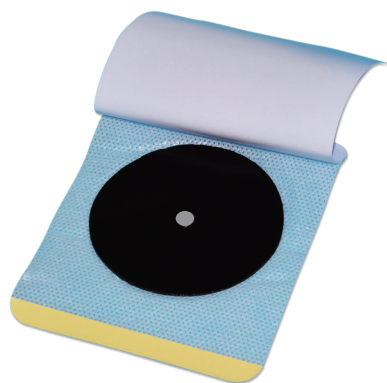



医疗器械生产许可证编号:苏食药监械生产许20162012号  
医疗器械产品注册证编号:苏械注准20190082  
医疗器械产品技术要求编号:苏械注准20190082

圣惠®



治疗类耗材

医用冷敷贴

冷敷理疗, 持续缓解疼痛

肌肉软组织、关节的麻木、酸痛感快速消除



苏州乐泰医疗科技有限公司  
Suzhou Letai Medical Technology Co., Ltd

创新 专注 专业  
INNOVATION / ABSORBED / PROFESSIONAL

# 医用冷敷贴

## 产品综述

医用冷敷贴由无纺布背衬层、凝胶层等部分组成,用于冷敷理疗。

## 处方资料

【产品名称】 医用冷敷贴

【型号/规格】 分为LFT-1、LFT-2、LFT-3、LFT-4、LFT-5、LFT-6、LFT-7、LFT-8、LFT-9九种规格。

【性能、结构及组成】 本产品由降温物质及固定器具组成。其中降温物质由凝胶层(亲水性高分子凝胶为载体,混合天然植物薄荷脑制成)组成,降温物质不含有发挥药理学、免疫学或者代谢作用的成分。

【适用范围】 用于人体表面特定部位降温,仅用于闭合性软组织。


【使用方法】 1、外用,用温水或酒精将闭合性软组织(颈、肩、腰、腿、四肢及关节等部位)引起的疼痛、肿胀、麻木部位清洁擦干后,敷贴于患处。  
2、1天1~2贴,4周为一周期;或遵医嘱。  
3、不在同一部位持续贴敷,产生斑疹换位置使用。

【禁忌症】 1、孕妇慎用;  
2、皮肤溃烂、过敏体质者不宜贴用;  
3、敷贴后如有不适,应停止贴敷。

【注意事项】 1、极少数人有皮肤过敏反应,应停用。  
2、产品一次性使用,使用完后丢弃至医用垃圾桶内。

【贮存、运输条件】 干燥通风处遮光保存,温度不得超过45℃。

其他内容详见使用说明书。

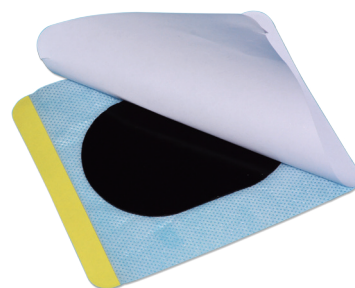

医疗器械生产备案号:苏苏食药监械生产备20162012号

医疗器械产品备案号:苏苏械备20190082号

医疗器械产品技术要求编号:苏苏械备20190082号

注册人/生产企业/售后服务单位:苏州乐泰医疗科技有限公司

住所/生产地址:苏州高新区五台山路116号7幢

电话/传真:0512-68784262

邮编:215163





医疗器械生产许可证编号:苏食药监械生产许20162012号

医疗器械产品注册证编号:苏械注准20190081


医疗器械产品技术要求编号:苏械注准20190081

圣惠®



治疗类耗材

医用退热贴

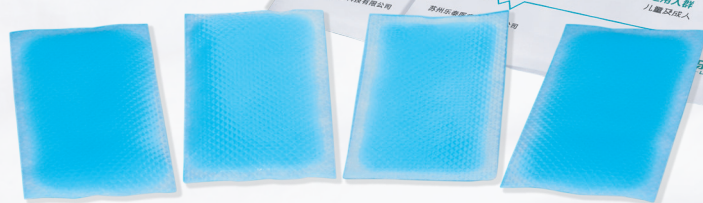

亲水凝胶, 无致敏无刺激

降温效果2°C, 持续8小时

无药物副作用



苏州乐泰医疗科技有限公司  
Suzhou Letai Medical Technology Co., Ltd

创新 专注 专业  
INNOVATION / ABSORBED / PROFESSIONAL

# 医用退热贴

## 产品综述

医用退热贴是利用国际流行的TDDS技术使水分透皮进入皮肤,然后通过水汽化吸热的物理变化达到降低体温效果的一种物理降温贴。

## 处方资料

【产品名称】 医用退热贴

【型号/规格】 分为TRT-A、TRT-B、TRT-C、TRT-D四种规格。TRT-A为幼儿型,TRT-B为儿童型、TRT-C为成人型、TRT-D为通用型。

【性能、结构及组成】 由降温物质及固定器具组成。其中降温物质由凝胶层(亲水性高分子凝胶为载体,混合天然植物薄荷脑制成)组成,降温物质不含有发挥药理学、免疫学或者代谢作用的成分。

【适用范围】 用于人体物理退热。仅用于闭合性软组织。

【使用方法】 外用,沿虚线撕开包装袋,取出贴剂,揭开保护膜将胶面直接贴敷于患处。

【禁忌症】 皮肤有破损严禁使用。

【注意事项】 1、本产品为物理退热,退热后请到医院就诊。  
2、本产品冷敷时,短期消肿止痛;病情加重时,应到医院就诊。  
3、进行药物治疗的患者,应遵医嘱。  
4、本产品仅辅助治疗。  
5、儿童应在成人的监护下使用。

【贮存、运输条件】 干燥通风处遮光保存,温度不得超过45℃。

其他内容详见使用说明书。



医疗器械生产备案号:苏苏食药监械生产备20162012号

医疗器械产品备案号:苏苏械备20190081号

医疗器械产品技术要求编号:苏苏械备20190081号

注册人/生产企业/售后服务单位:苏州乐泰医疗科技有限公司

住所/生产地址:苏州高新区五台山路116号7幢

电话/传真:0512-68784262

邮编:215163





医疗器械生产备案号:苏苏食药监械生产备20162012号

医疗器械产品备案号:苏苏械备20190099号

医疗器械产品技术要求编号:苏苏械备20190099号

圣惠®



治疗类耗材

医用冷敷眼罩

适用科室广泛

纯天然水凝胶材质

械字号 I 类, 操作简单, 上量明显



苏州乐泰医疗科技有限公司  
Suzhou Letai Medical Technology Co., Ltd

创新 专注 专业  
INNOVATION / ABSORBED / PROFESSIONAL

# 医用冷敷眼罩



## 产品综述

医用冷敷眼罩能缓解中老年人视疲劳、干眼症及眼睛不适;改善青少年假性近视,促进眼睛健康;对黑眼圈、眼胀、眼袋消除有很好的缓解效果。

## 处方资料

【产品名称】 医用冷敷眼罩

【型号/规格】 分为TRT-A、TRT-B、TRT-C、TRT-D四种规格。TRT-A为幼儿型,TRT-B为儿童型、TRT-C为成人型、TRT-D为通用型。

【性能、结构及组成】 本产品由降温物质及固定器具组成。其中降温物质由聚乙烯醇水凝胶组成,降温物质不含有发挥药理学、免疫学或者代谢作用的成分。

【适用范围】 用于人体物理退热、体表面特定部位的降温。仅用于闭合性软组织。

【使用方法】 1、使用前清洗眼部周边汗渍、污迹,打开包装,揭开隔离纸,将医用冷敷眼罩固定在眼部位即可。  
2、每次使用时间一般在20分钟左右。

【禁忌症】 1、孕妇慎用;  
2、皮肤溃烂、过敏体质者不宜贴用;  
3、敷贴后如有不适,应停止贴敷。

【注意事项】 1、极少数人有皮肤过敏反应,应停用。  
2、产品一次性使用,使用完后丢弃至医用垃圾桶内。

【贮存、运输条件】 产品应储存在无腐蚀气体,阴凉、干燥通风良好的室内。

其他内容详见使用说明书。

医疗器械生产备案号:苏苏食药监械生产备20162012号

医疗器械产品备案号:苏苏械备20190099号

医疗器械产品技术要求编号:苏苏械备20190099号

注册人/生产企业/售后服务单位:苏州乐泰医疗科技有限公司

住所/生产地址:苏州高新区五台山路116号7幢

电话/传真:0512-68784262

邮编:215153





圣惠®



治疗类耗材

抗过敏凝胶

有效阻断吸入性过敏原对人体的作用

不含有药物, 无任何毒副作用

直接规避过敏原的接触

随身携带, 使用方便



苏州乐泰医疗科技有限公司  
Suzhou Letai Medical Technology Co., Ltd

创新 专注 专业  
INNOVATION / ABSORBED / PROFESSIONAL

# 抗过敏凝胶

## 产品综述

抗过敏凝胶通过阻断室内和室外的过敏原，以一种独特的非药物途径来帮助预防鼻部过敏症状。当空气传播的飘尘，花粉，屋尘，尘螨，动物皮屑等进入鼻腔时就能够引起过敏症状。新颖的抗过敏凝胶在粉尘和过敏原进入鼻腔之前，通过接触阻断粉尘、过敏原而发挥作用。阻断飘尘、过敏原能够帮助预防过敏症状。抗过敏凝胶适用于治疗季节性或常年性过敏性鼻炎。

## 处方资料

【产品名称】 抗过敏凝胶

【型号/规格】 分为2.5g, 5g, 7.5g, 10g, 15g, 20g 六种规格。

【适用范围】 抗过敏凝胶适用于治疗季节性或常年性过敏性鼻炎。

【主要结构】 本产品主要由阳离子瓜尔胶、PEG100硬脂酸酯、甘油、丙二醇、对羟基苯甲酸甲酯、对羟基苯甲酸丙酯、依地酸二钠、聚山梨酯80、枸橼酸、柠檬香精及纯化水组成。

【使用方法】 1、挤出适量本品在食指上；  
2、用拇指和食指将本品在两指间抹开；  
3、均匀涂抹在鼻孔周围和鼻腔粘膜处。

【禁忌症】 已知对本品成分过敏、鼻部皮肤溃破、急性化脓性鼻窦炎者禁用。

【注意事项】 1、本品为鼻腔粘膜用；  
2、避免接触眼睛；  
3、如有刺激或发疹现象，请以清水冲洗，并停止使用；  
4、请置于儿童无法触及处；  
5、严禁过量使用导致鼻腔堵塞。

其他内容详见使用说明书。

注册人/ 生产企业/售后服务单位：苏州乐泰医疗科技有限公司  
住所：苏州高新区五台山路116号7幢  
生产地址：苏州高新区协新路22号、苏州高新区五台山路116号7幢  
电话/传真：0512-68784262  
邮编：215153



医疗器械生产许可证编号：苏食药监械生产许20170054号  
医疗器械产品注册证编号：苏械注准20192140261  
医疗器械产品技术要求编号：苏械注准20192140261

圣惠®



治疗类耗材

硅酮疤痕凝胶

美国进口优质原料

紧密无间的跟疤痕凹凸贴合

使用3-4周后，除疤效果明显（变软、变平、变淡）



苏州乐泰医疗科技有限公司  
Suzhou Letai Medical Technology Co., Ltd

创新 专注 专业  
INNOVATION / ABSORBED / PROFESSIONAL



# 硅酮疤痕凝胶



## 产品综述

硅酮疤痕凝胶具有辅助改善皮肤病理性疤痕，辅助预防皮肤病理性疤痕的形成。病理性疤痕包含增生性疤痕和疤痕疙瘩。

## 处方资料

【产品名称】 硅酮疤痕凝胶

【型号/规格】 分为5g、10g、15g、20g、30g、50g、60g、120g、150g、250g、500g共十一种规格。

【产品性能】 1、硅酮疤痕凝胶为白色或微黄色或褐色的凝胶状物质，质地均匀，无或仅有少量气泡，无不可溶性异物。  
2、硅酮疤痕凝胶的动力黏度(25℃)应不小于50Pa.s。  
3、硅酮疤痕凝胶应在10分钟内成膜。  
4、硅酮疤痕凝胶水溶液的pH值应为5.0~7.5。  
5、硅酮疤痕凝胶的重金属含量(以Pb计)应≤0.003%。

【适用范围】 硅酮疤痕凝胶用于辅助改善皮肤病理性疤痕，辅助预防皮肤病理性疤痕的形成，不用于未愈合的伤口。

【主要结构】 硅酮疤痕凝胶由硅酮(二甲基硅油)、硬脂酸、医用甘油(丙三醇)、纯化水等混合而成，硅酮含量不低于产品标示装量的4%。采用塑料软管包装。

【使用方法】 1、对创面疤痕处理后，将硅酮疤痕凝胶涂抹在疤痕治疗部位；  
2、成膜后保持8小时，每天一次，建议使用三个月以上。

【禁忌症】 1、疤痕尚未愈合收口，有分泌物或发炎感染时禁用；  
2、过敏体质慎用，对本品过敏者禁用。

【注意事项】 1、软膏开启使用后应拧紧旋塞，三月以上时间不使用，使用前观察软膏有无色泽变化，如有变化，禁止使用。  
2、用于疤痕方面时，直接涂抹于疤痕表面。

【贮存、运输条件】 本品应避日光直射，保持密封，放置在阴凉、通风良好的室内保存。

其他内容详见使用说明书。

医疗器械生产许可证编号：苏食药监械生产许20170054号

医疗器械产品注册证编号：苏械注准20192140261

医疗器械产品技术要求编号：苏械注准20192140261

注册人/生产企业/售后服务单位：苏州乐泰医疗科技有限公司

住所/生产地址：苏州高新区五台山路116号7幢

电话/传真：0512-68784262

邮编：215163



生产许可证编号:苏食药监械生产许20170054号

产品注册证编号:苏械注准20172210992

产品技术要求编号:苏械注准20172210992

圣惠®



传导类耗材

一次性使用心电电极

与人体贴合紧密,性能稳定

对皮肤无致敏、无刺激、无细胞毒性

固体水凝胶+银/氯化银导电扣,导电性能优良



苏州乐泰医疗科技有限公司  
Suzhou Letai Medical Technology Co., Ltd

创新 专注 专业  
INNOVATION / ABSORBED / PROFESSIONAL

# 一次性使用心电电极

## 产品综述

一次性心电电极是一次性使用的电极,包括导电电极、导联线、导电胶、贴纸、及离型膜。

## 处方资料

【产品名称】 一次性使用心电电极

【产品性能】 交流阻抗:至少12对胶对胶连接的电极对,在10Hz、不超过100 $\mu$ A(峰-峰)的外加电流下,其阻抗平均值应不超过2k $\Omega$ 。每一单独的胶对胶电极对的阻抗应不超过3k $\Omega$ 。

2、直流失调电压:一对胶对胶连接的电极经1min的稳定期后,出现的失调电压应不大于100mV。

3、复合失调不稳定性 and 内部噪声:一对胶对胶连接的电极经1min的稳定期后,在0.15Hz~100Hz的频带(一阶频响)下产生的电压,在随后的5min内应不大于150 $\mu$ V(峰-峰)。

4、除颤过载恢复:充电至200V的10 $\mu$ F电容器,通过电极对与100 $\Omega$ 电阻的串联回路放电,在电容器开始放电后的第5s,胶对胶连接的电极对的极化电动势的绝对值不超过100mV;在此后的30s内,剩余极化电动势的变化率不大于 $\pm 1$ mV/s。在按本要求进行上述实验后,电极对的10Hz交流阻抗应不大于3k $\Omega$ 。


5、偏置电流耐受度:给胶对胶连接的电极对施加200nA的直流电流,持续时间不小于8h,在整个持续时间内观测的电极对两端的电压变化不大于100mV。

【主要结构组成】 由基衬、导电膏、电极扣组成,基衬材料可用无纺布、发泡纸、加涂医用压敏胶制成。

【适用范围】 配合仪器,供心电图检测、监测用。

【禁忌症】 过敏体质慎用。

其他内容详见使用说明书。

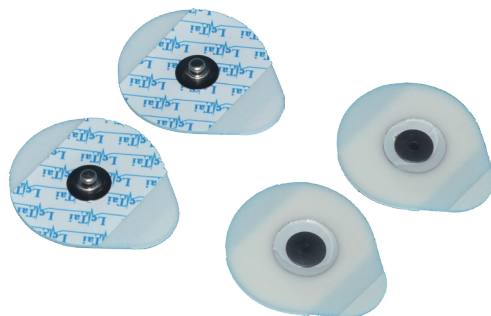

生产许可证编号:苏食药监械生产许20170054号

产品注册证编号:苏械注准20172210992

产品技术要求编号:苏械注准20172210992

注册人/生产企业/售后服务单位:苏州乐泰医疗科技有限公司

住所/生产地址:苏州高新区协新路22号

电话/传真:0512-68784262





医疗器械生产备案号:苏苏食药监械生产备20162012号

医疗器械产品备案号:苏苏械备20170659号

产品技术要求编号:苏苏械备20170659号

圣惠®

防护类耗材

弹性绷带



弹性纯棉材料

自粘性良好,不易脱落

可随意调节绷带松紧度

收卷均匀,打开方便,具有良好的拉伸强度



苏州乐泰医疗科技有限公司  
Suzhou Letai Medical Technology Co., Ltd

创新 专注 专业  
INNOVATION / ABSORBED / PROFESSIONAL

# 弹性绷带

## 产品综述

弹性绷带弹力绷带是用自然纤维编织而成，质料柔软，弹性极高。主要用于外科包扎护理。

## 处方资料

【产品名称】 弹性绷带

【型号/规格】 分为TB25W、TB50W、TB75W、TB100W、TB150W、TB25QW、TB50QW、TB75QW、TB100QW、TB150QW、TB25FW、TB50FW、TB75FW、TB100FW、TB150FW、TB25SW、TB50SW、TB75SW、TB100SW、TB150SW二十种规格。

【产品性能】 1、外观：弹性绷带应卷轴整齐、均匀、平整，无缺经、缺纬、无胶块等缺陷。  
2、基本尺寸和允差：弹性绷带的基本尺寸和允差应符合表1的要求。  
3、粘着性：粘着性剥离强度 $\geq 1.0\text{N}/2.5\text{cm}$ 。

【主要结构组成】 弹性绷带由棉纱、棉氨纶包芯纱、医用中间体自粘胶等材料制造。

【适用范围】 用于对创面敷料或肢体提供束缚力，以起到包扎、固定作用。

【禁忌症】 过敏体质慎用。

【注意事项】 1、缠绕平整不能有皱褶；松紧适度。  
2、不直接接触创面。

【使用说明】 使用前应先使用医用纱布包裹缠绕需包扎部位，再使用缠绕方法将弹性绷带固定在需包扎部位。

【贮存、运输条件】 应贮存于相对湿度不大于80%、通风良好的室内。可采用一般运输工具运输。运输时防止雨淋、受潮。

其他内容详见使用说明书。



医疗器械生产备案号：苏苏食药监械生产备20162012号

医疗器械产品备案号：苏苏械备20170659号

产品技术要求编号：苏苏械备20170659号

注册人/生产企业/售后服务单位：苏州乐泰医疗科技有限公司



住所/生产地址：江苏省苏州市高新区协新路22号

邮编：215163

电话：0512-68078142



医疗器械生产备案号:苏苏食药监械生产备20162012号  
医疗器械产品备案号:苏苏械备20160647号  
产品技术要求编号:苏苏械备20160647号

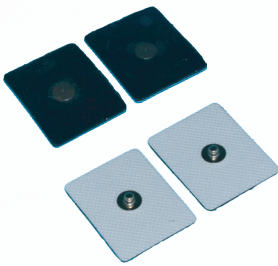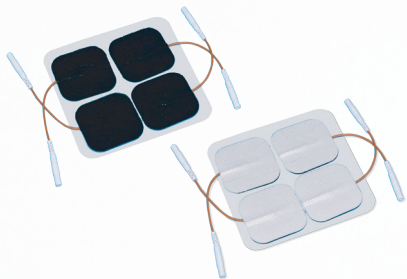

导电电阻低于1000欧姆

与皮肤适度粘附,密合成度高

良好的生物相容性,无致敏,无刺激,无毒副作用





# 理疗电极片



## 产品综述

理疗电极片用于所有中低频类仪器设备跟人体之间电信号传导输出。

## 处方资料

【产品名称】 理疗电极片

【预期用途】 与中低频理疗仪、中医定向透药治疗仪配套使用，用于传导仪器发出的电脉冲信号。

【 型 号 】 理疗电极片（以下简称电极片）按连接的方式分为钮扣式、导线式二种。LW型是无纺布材质，LP型是泡棉材质。DX是定向透药治疗仪专用型。

【使用方法】 1、清洁粘贴部位。

2、将导线（或纽扣）连接设备。

3、去除隔离纸，将电极贴于使用部位、抚平背衬。

【注意事项】 1使用时，应保持粘贴处皮肤干燥；电极片与皮肤紧密、均匀接触。

2、勿将电极片粘贴于乳头、皮肤皱褶、骨头结节、伤疤组织、皮肤破损或发炎部位。

3、过敏体质人群及老年人慎用，使用中若发现过敏应立即撕下，由医护人员处理后消除过敏。

4、粘贴本产品不能接受磁共振图像检查。

5、治疗中，电极片不可置于心脏前后。

6、使用前或使用中如有问题，建议向医生咨询。

7、本产品应贮存于相对湿度不大于80%、通风良好的室内。

8、除非立即使用，否则请勿拆开包装。

其他内容详见使用说明书。

医疗器械生产备案号：苏苏食药监械生产备20162012号


医疗器械产品备案号：苏苏械备20160647号

产品技术要求编号：苏苏械备20160647号

备案人/生产企业/售后服务单位：苏州乐泰医疗科技有限公司

住所/生产地址：苏州高新区协新路22号

电话/传真：0512-68784262

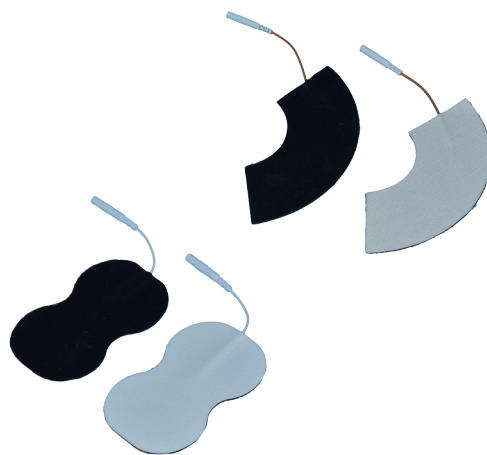

医疗器械生产备案号:苏苏食药监械生产备20162012号

医疗器械产品备案号:苏苏械备20170660号

产品技术要求编号:苏苏械备20170660号

圣惠®

传导类耗材

医用超声耦合剂



超声图像清晰

不化水, 不易干, 易擦净



苏州乐泰医疗科技有限公司  
Suzhou Letai Medical Technology Co., Ltd

创新 专注 专业  
INNOVATION / ABSORBED / PROFESSIONAL

# 医用超声耦合剂


## 产品综述

医用超声耦合剂是一种由新一代水性高分子凝胶组成的医用产品。其能够保护超声探头，并能够使超声图像更加清晰。

## 处方资料

- 【产品名称】 医用超声耦合剂
- 【预期用途】 在超声诊断和治疗操作中，充填或涂敷于皮肤-粘膜与探头（或治疗头）辐射面质检，用于投射声波的中介媒质。
- 【型号/规格】 按装入容量分为10g, 12g, 15g, 18g, 20g, 30g, 250g, 500g, 5000g 九种规格。
- 【组 成】 耦合剂为水性高分子凝胶型制剂，由卡波姆、月桂醇醚硫酸钠（甜菜碱）、维生素B5、丙二醇组成。
- 【主要指标】 1、外观：产品一般应为无色或浅色透明凝胶状、无或仅有少量气泡，无不溶性异物。  
2、粘度： $\geq 30$ 。  
3、pH值：5.5~8.0
- 【使用方法】 外用，涂敷于皮肤-粘膜与探头辐射面之间。
- 【注意事项】 1、高敏体质、体表有创伤者、孕妇应遵循医嘱使用。  
2、除非立即使用，否则请勿拆开包装。
- 【贮 存】 应贮存与-10℃~+40℃，通风良好的室内。

其他内容详见使用说明书。

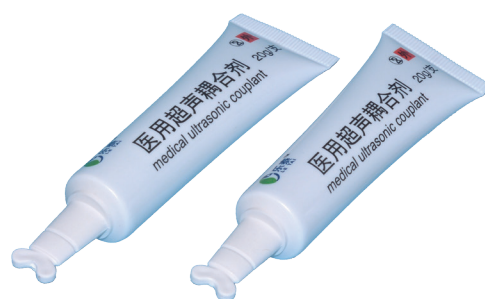

医疗器械生产备案号：苏苏食药监械生产备20162012号  
医疗器械产品备案号：苏苏械备20170660号  
产品技术要求编号：苏苏械备20170660号  
注册人/生产企业/售后服务单位：苏州乐泰医疗科技有限公司  
住所/生产地址：江苏省苏州市高新区协新路22号  
电话/传真：0512-68078142  
邮编：215163





医疗器械生产许可证编号:苏食药监械生产许20170054号

医疗器械产品注册证编号:苏械注准20192140027

医疗器械产品技术要求编号:苏械注准20192140027

圣惠®



治疗类耗材

生理性海水鼻腔喷雾器

不含激素, 不含抗生素

纯天然等渗海水配制, 高效安全

鼻腔各种疾病和不适症状的缓解和辅助治疗



苏州乐泰医疗科技有限公司  
Suzhou Letai Medical Technology Co., Ltd

创新 专注 专业  
INNOVATION / ABSORBED / PROFESSIONAL

# 生理性海水鼻腔喷雾器

## 产品综述

生理性海水鼻腔喷雾器是一款集治疗和护理于一体的高科技产品。主要用于各类急、慢性鼻炎的治疗，鼻腔术前、后冲洗，促进伤口愈合，修复鼻粘膜，改善鼻塞、鼻痒、鼻干等不适症状

## 处方资料

- 【产品名称】 生理性海水鼻腔喷雾器
- 【型号/规格】 分为10ml, 30ml, 40ml, 50ml, 60ml, 70ml, 80ml, 100ml, 150ml九种规格。
- 【主要结构】 生理性海水鼻腔喷雾器由瓶体、手动泵、喷嘴、防尘罩及生理性海水组成。其中，生理性海水为生理性海水。瓶体为聚乙烯材料或铝罐装。产品为手压型。
- 【使用方法】 1、开启防尘罩。头稍往后仰，将喷嘴置于鼻孔前，轻按手动泵，生理性海水呈雾状喷出；  
2、每次每侧鼻孔4-8喷。用纸巾擦除鼻分泌物及多余的生理性海水；  
3、清洁喷嘴，盖上防尘罩；  
4、每天2-6次；  
5、儿童使用过程中，请注意调整头部后仰的幅度，以免生理性海水溶液呛至肺部，造成不必要的损伤。
- 【禁忌症】 1、鼻腔大面积创伤者；  
2、严重氯化钠代谢障碍和过敏者。
- 【注意事项】 1、幼儿及儿童使用时需成人帮助（小孩使用时，喷嘴不需伸进鼻孔）；  
2、六个月以下婴儿使用遵照医嘱；  
3、本品不含抗生素和激素；  
4、请置于儿童无法触及处。

其他内容详见使用说明书。

医疗器械生产许可证编号：苏食药监械生产许20170054号  
医疗器械产品注册证编号：苏械注准20192140027  
医疗器械产品技术要求编号：苏械注准20192140027  
注册人/生产企业/售后服务单位：苏州乐泰医疗科技有限公司  
住所/生产地址：苏州高新区五台山路116号7幢  
电话/传真：0512-68784262  
邮编：215163

